



2020年6月
株式会社 JVC ケンウッド
ヘルスケア事業部

新型コロナウイルス（COVID-19）に対する消毒について

※下記手順に従って消毒作業をすることで、製品に対する除菌効果が期待できます。

【対象製品】

視線計測装置 Gazefinder


【準備するもの】

1. マスク、使い捨て手袋
2. クリーニング用の布地
カメラ部：眼鏡クリーニング用の布
カメラ部以外：マイクロファイバークロス等、柔らかく糸くずが出ないもの。
注：カメラ部は消毒用薬剤が異なります。クリーニング用の布地は、消毒用薬剤ごとに準備してください。
3. 消毒用薬剤
(1)カメラ部
0.05%次亜塩素酸ナトリウム
(塩素系漂白剤に含まれる次亜塩素酸ナトリウムの濃度を 0.05%に希釈したもの)
製品によって濃度が異なりますので、使用にあたっては、製品パッケージやHPの説明をご確認ください。
(2)カメラ部を除く
以下のいずれかをご使用ください。
①70%濃度イソプロピルアルコール
②80%濃度消毒用アルコール（エチルアルコール）
注1：シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナーは絶対使用しないこと。
注2：消毒用薬剤については、製造・販売者のHPや注意書き等をよくお読みになり、安全にお使いください。


【消毒手順】

1. マスク、使い捨て手袋を装着します。
2. 製品の電源を切り、電源コードを外す。
電源が入った状態や電源に接続されたまま消毒すると、感電や故障の原因となることがあります。
3. その他に接続されているケーブルや機器があれば、すべて取り外します。
4. クリーニング用の布地に消毒液を浸透させます。
注) 消毒液が滴らないようにすること。製品に直接吹きかけないこと。
5. 製品をまんべんなく拭きます。
注) 画面を拭く際、画面や外枠（ベゼル）を強く押しすぎたり強くこすらない。
画面の故障や傷につながる可能性があります。
下図の赤枠で囲まれたカメラ部は、眼鏡クリーニング用の布に 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを浸透させて拭いてください。拭き取り後、眼鏡クリーニング用の布でやさしく乾拭きしてください。

型名 NP-H00*、NP-1**

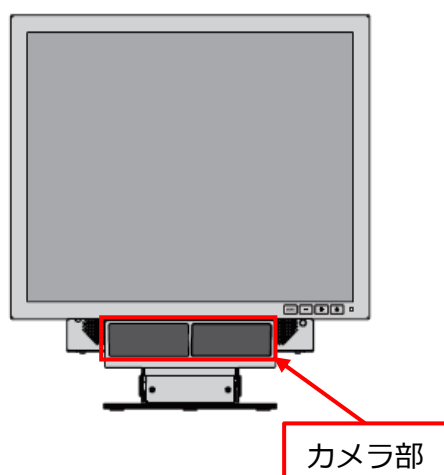

型名 NP-200

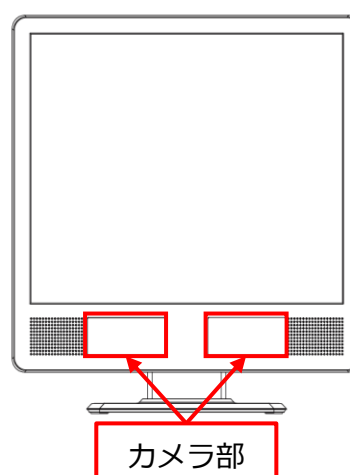

6. 作業終了後、製品を十分乾かします。
7. 当該製品に添付されていた電源コード、ACアダプタ、変換アダプタ（電源コード 3 極→2 極変換）、マウス、キーボードについても、上記手順により消毒を行って下さい。その他の接続機器については、それぞれの製造・販売者の指示に従って消毒してください。
8. 作業終了後、マスク、使い捨て手袋は廃棄し、速やかに手洗い・うがいをしてください。
注) 廃棄物はなるべく密閉して廃棄してください。

【消毒後の処置】

1. 製品や電源コード、ケーブルなどが十分乾いていることを確認します。
2. 製品にケーブルや機器を接続します。
3. 電源コードを接続し、電源を入れる。

上記の消毒作業により、製品の 光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐れがあります。予め目立たない箇所で拭いてみるなどしてしてからご使用ください。

水滴を付けた状態で放置しないでください。

製品の取扱説明書、保証書をよくお読みになり、正しくお使いください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 JVC ケンウッド ヘルスケア事業部 開発営業部

TEL : 045-444-5354